



Guide de taille de tétérelle

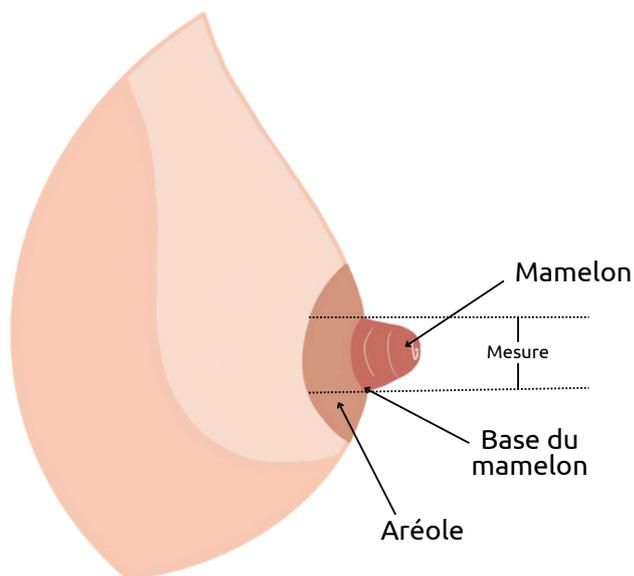

Pour déterminer votre taille, mesurez le diamètre de la base de votre mamelon juste après une tétée ou au repos (dans ce cas, ajouter 2 mm à votre mesure).


Pour une utilisation efficace du tire-lait Emy Pump, il est primordial d'utiliser la bonne taille de tétérelle pour optimiser l'écoulement du lait et son expression.

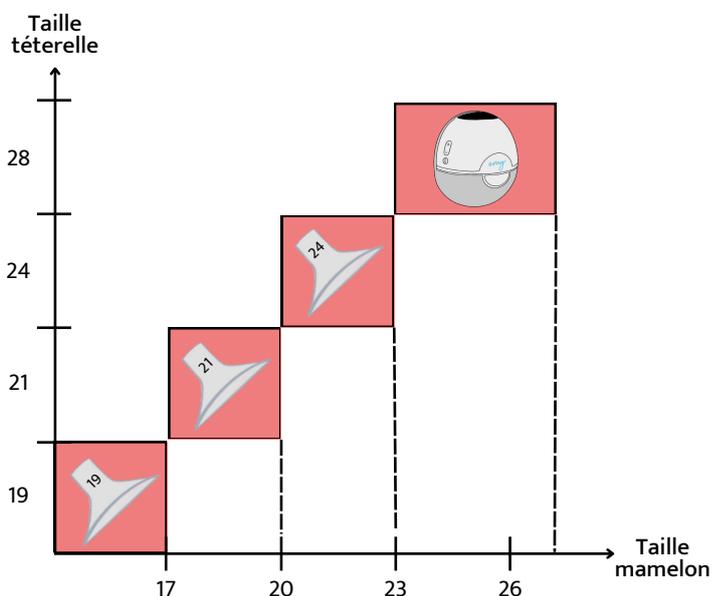

Comment savoir si la taille de tétérelle est bien adaptée ?




Taille correcte

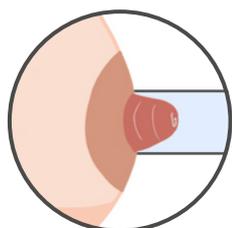

Votre mamelon est centré dans la tétérelle et bouge librement.




Trop petite

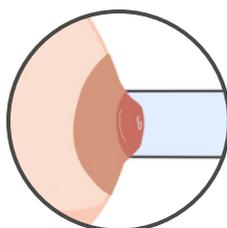

Votre mamelon frotte sur le côté de l'embout. Essayez une taille de tétérelle plus grande.



Trop grande

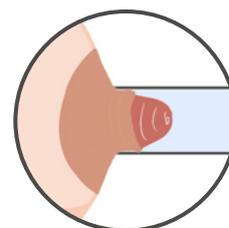

Une partie de votre aréole est aspirée dans la tétérelle et frotte contre le bord. Essayez une taille de tétérelle plus petite.

La taille de tétérelle peut être différente pour chaque sein et peut aussi évoluer au cours de l'allaitement. N'hésitez pas à demander conseil à votre sage-femme ou à une consultante en lactation.